

## Kurzbedienungsanleitung CADD-Solis 2100 Pumpe

- Gerät einschalten (seitl. Rechts)
- Mit neuem Pat. Beginnen? Ja
- Code eingeben 2 0 1 (mit Pfeiltaste + mit wählen weiter)
- Wert speichern
- periphere Nervenblockade – wählen
- axillare, dist. Ischiaticus Blockade (popl. Block), fem. ISPK –auswählen  
Mit Pfeiltaste und mit wählen bestätigen.
- Medikament (Naropin 0,3 %) wählen
- korrekt? Ja
- Pumpeneinstellung überprüfen - überprüfen
- Rate, Bolus, Reservoirinhalt - Wert speichern (jeder Wert einzeln Häkchen)
- weiter drücken (Bügel öffnen ev. vorher noch mit Schlüssel entriegeln)
- Kassette anschließen, mit Klick einrasten. Bügel schließen)
- bei Bedarf Schlauch füllen – ja
- vorfüllen
- wenn vollständig gefüllt – vorfüllen stoppen
- Vorfüllen fortsetzen – nein
- Kassette verriegeln
- Pumpe starten - ja Pumpe läuft.

Auf dem Display sind alle Daten sichtbar, Display schält sich nach ein paar Sek. ab, durch beliebige Taste wieder aktivierbar.

### Reservoirbeutel wechseln

- Pumpe stoppen - Ja
- Beutel wechseln
- Beutelinhalt anklicken – wählen drücken
- Code erscheint eingeben 2 0 1 - Wert speichern
- aktueller Beutelinhalt erscheint – mit wählen zurücksetzen- speichern
- Pumpe starten überprüfen
- Werte speichern, dann weiter
- Pumpe starten- ja Pumpe läuft.

Solis 2110 - Code 921

Arzt Code

997

## Bolus geben

- Bolus geben im laufenden ,Betrieb
- Optionen drücken
- Arztbolus- mit wählen bestätigen
- Code eingeben 9-9-7
- bei z.B. distale Ischiaticus Blockade erscheint als Vorschlag 10 ml, kann aber bei Bedarf bis 20 ml hochgestellt werden durch Pfeiltaste + bestätigen
- Arztbolus geben – ja
- Pumpe gibt Bolus ab.- kann jederzeit durch -Bolus stoppen- ja- ok- gestoppt werden.
- zurück Normales Protokoll erscheint wieder

## Pumpe ausschalten

- Stop drücken – Pumpe stoppen – ja
- auf Ausschaltknopf drücken
- ausschalten – ja
- Pumpe schält sich aus

FOSAVANCE  
Abendrost/Colecalciferol

5500

zur Zeit

Schlüssel ist im

~~Schwarz Koffer~~

AWR Schranz nr. 28