

Kurzbedienungsanleitung für CADD-Solis 2110 Pumpe „ Code 921“ „Arztcode 997“ (ev. Noch alter Code 201)

- Pumpenbatteriefach (oben an der Pumpe) öffnen und bei Bedarf mit Batterien versorgen
 - CADD-Pumpe einschalten (rechte Seite Druckschalter)
 - Batterie Füllungszustand rechts oben auf dem Bildschirm sichtbar (grüner Balken)
 - auf dem Bildschirm erscheint „Mit neuem Patienten beginnen“ wenn neuer Patient, dann ja, ansonsten nein drücken.
 - Manuelles Programm erscheint, Befehl „ zurück“ drücken
 - Kontinuierliche Rate, PCA-Bolus und Reservoirinhalt erscheint auf dem Bildschirm. Jetzt kontinuierliche Rate „wählen“.
 - Code eingeben. 921, dann Wert speichern
 - ml Rate erscheint, mit Pfeil nach oben, oder nach unten verändern und bestätigen.
 - Softlimit aufheben mit „ja“ . Jetzt mit Cursor nach unten.
 - PCA Bolus unverändert auf 0 lassen, Reservoirinhalt wählen und auf zurücksetzen gehen. Code erneut eingeben (921), dann speichern.
 - Reservoirinhalt auf 200 ml erhöhen durch Cursertaste dann speichern.
 - Pumpe starten, Pumpeneinstellung überprüfen. Überprüftaste drücken Kontinuierliche Rate-speichern, PCA Bolus-speichern, Reservoirinhalt-speichern
 - weiter drücken.
 - Jetzt Beutel vorbereiten- Luftleer machen mit Hilfe einer 10 ml Spritze
 - Reservoirbeutel an System anschließen. (CADD-Administration Set)
Mit leichtem Druck auf den Beutel System füllen. Dann Klemmverschluß am System verschließen.
 - das System an der CADD-Pumpe anschließen
 - Bügel an der Pumpe öffnen, die 2 Bügel des Systems unter die Gerätelaschen bringen Systemplatte andrücken und dann Pumpenbügel schließen und mit Schlüssel verriegeln.
 - Über den Befehl Pumpensystem füllen kann das System auch gefüllt werden (ist aber jetzt nicht notwendig)
- Jetzt Pumpe starten mit ja.

Beutel leer-neuen Beutel anhängen

- Pumpe stoppen, leeren Beutel aus Tasche nehmen, neuen Beutel richten und luftleer machen. Jetzt System Stechkanüle aus altem Beutel ziehen und in den desinfizierten neuen Beutelansatz einstecken. Neuen Beutel wieder in der Tasche versorgen.
- Reservoirinhalt wieder auf 200 ml einstellen Reservoirinhalt zurücksetzen- Code eingeben-speichern, Pumpe starten, Pumpeneinstellung überprüfen, die einzelnen Werte speichern, dann weiter und dann Pumpe starten.

Patient hat Schmerzen-Kontinuierliche Rate erhöhen

- Rate anwählen, Code eingeben, Wert speichern, Wert erhöhen, bestätigen, Soft Limit aufheben und Pumpe läuft mit erhöhtem Wert weiter.
„Pumpe läuft“ erscheint auf dem Bildschirm ganz oben.

Arzt Bolus geben

- Optionen anwählen, Arztbolus erscheint, wählen, Code eingeben 921
Wert speichern, Bolusgröße wählen, mit Cursor und Wert bestätigen.
Soft limit aufheben, Bolus läuft, kann aber gestoppt werden-ja-ok-zurück